

# AngelSounds ©

## Prenatal Heart Monitor



### **Wat is een dop tone ?**

Eenvoudig uitgelegd is de doptone een apparaat om geluid te versterken op basis van een natuurkundig effect dat Doppler effect heet. Het werkt op basis van geluid en is niet schadelijk.

### **Wat gaat u horen?**

U hoort achtergrondruis met daarin duidelijk de hartslag van de baby, "baarmoeder" geluiden als borrelen en bewegen van de baby en vaak ook de hartslag van de moeder. Door de sensor goed in te smeren met ruim baby olie, lotion of speciale ultrasound gel en te bewegen over de buik kunt u het hart van de baby vinden. Dit vergt enige handigheid en lukt niet altijd omdat het afhankelijk is van de houding van de baby in de baarmoeder.

### **In gebruik nemen**

Open het battenjklepje en zet een 9 volt batterij op zijn plaats.

Plug de koptelefoon in het apparaat.

Zet het apparaat aan met de on/off draaiknop. Het lichtje van de on/off knop brandt.

Zet de doppler sonde op de buik van de moeder en zoek de hartslag van de baby. (water of gel moet aangebracht worden op het oppervlak van de sonde.)

De hartslag van de baby kan het duidelijkst gehoord worden als de sonde op het hartje van de baby geplaatst is.

Pas het volume aan en beweeg de sonde indien het geluid niet duidelijk of zwak is totdat de hartslag van de baby gevonden is.

De hartslag van de baby kan opgenomen worden op band door de bijgeleverde kabel in een bandrecorder te pluggen.

### **De 6 Hoofdfuncties van Angelsounds**

Hoor het facinerende geluid van hartslag, boertjes en trappelen van uw baby.

Luister naar de hartslag van uw baby. Regelmatige controle van de zwangere door arts of verloskundige kan niet vervangen worden door Angelsounds.

Opnames van de hartslag van uw baby zijn waardevolle herinneringen.

Opnames maken van de hartslag van de moeder. Indien u die afspeelt voor de baby in de maanden na de geboorte, kunnen die helpen uw baby tot rust te brengen.

Controleren van een zwakke hartslag bij ouderen.

Medizon: [www.medizon.be](http://www.medizon.be)

# AngelSounds ©

Prenatal Heart Monitor

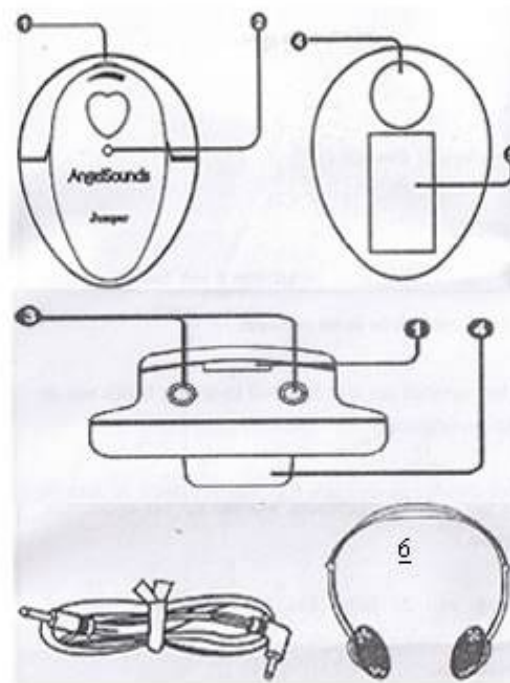


Fig.1 - ON/OFF Volume knop.

Fig.2 - LED Power lichtje.

Fig.3 - Luidspreker / hoofdtelefoon aansluiting (2x).

Fig.4 - Doppler sonde.

Fig.5 - Batterijhouder.

Fig.6 - Hoofdtelefoon / headphone.

## Indien het apparaat niet werkt, controleer het volgende:

- Het apparaat is niet aangezet met de on/off knop.
- Het volume is te laag gedraaid.
- Batterij zit niet juist in het apparaat.
- Koptelefoon is niet verbonden met het apparaat.
- Zwakke batterij (het lichtje van de on/off knop brandt zwak).
- Hoge piepende geluiden: zet het volume zachter of vergroot de afstand tussen koptelefoon en apparaat. Zet het apparaat alleen aan als het tegen uw lichaam is gedrukt.
- Veel ruis: gebruik meer gel of olie.
- Geen hartslag: probeer een dag later nog eens. Bij zorgen hierover, altijd arts/verloskundige bellen.

## Disclaimer:

De Angelsounds is niet bedoeld als medisch controle instrument. Angelsounds vervangt nooit de arts of verloskundige. Bij zorgen over de zwangerschap altijd uw arts / verloskundige consulteren ongeacht het al dan niet waarnemen van een hartslag met de Angelsounds. De Angelsounds is niet waterbestendig en mag nooit ondergedompeld worden.

Medizon: [www.medizon.be](http://www.medizon.be)